



Инструкция по применению

Абдукционный механизм с тыльной флексией



②



②



③

① Назначение / Противопоказания

Абдукционный механизм с тыльной флексией для профилактики рецидивов косолапости и (или) походки с супинацией стопы. Использовать только с ортезом голеностопного сустава ADM (как брейс ночного ношения) или с приспособленной амбулаторной обувью (как брейс дневного ношения) по назначению врача. Не использовать при нескорректированной косолапости или в случае рецидива. Если есть сомнения, обратитесь к лечащему врачу. Настоящая инструкция относится к использованию с ортезом голеностопного сустава ADM (в качестве брейса ночного ношения); информация о подборе и регулировке ортеза голеностопного сустава ADM и о его применении с амбулаторной обувью приведена в дополнительных инструкциях.

② Наденьте ортез

Наденьте ортез голеностопного сустава ADM на пациента согласно инструкции из комплекта поставки.


③ Установите механизм ADM на ортез

Установите механизм ADM на ортез. Убедитесь, что боковые замки защелкнулись и зафиксировали механизм ADM на ортезе



c-pro_{direct}

4

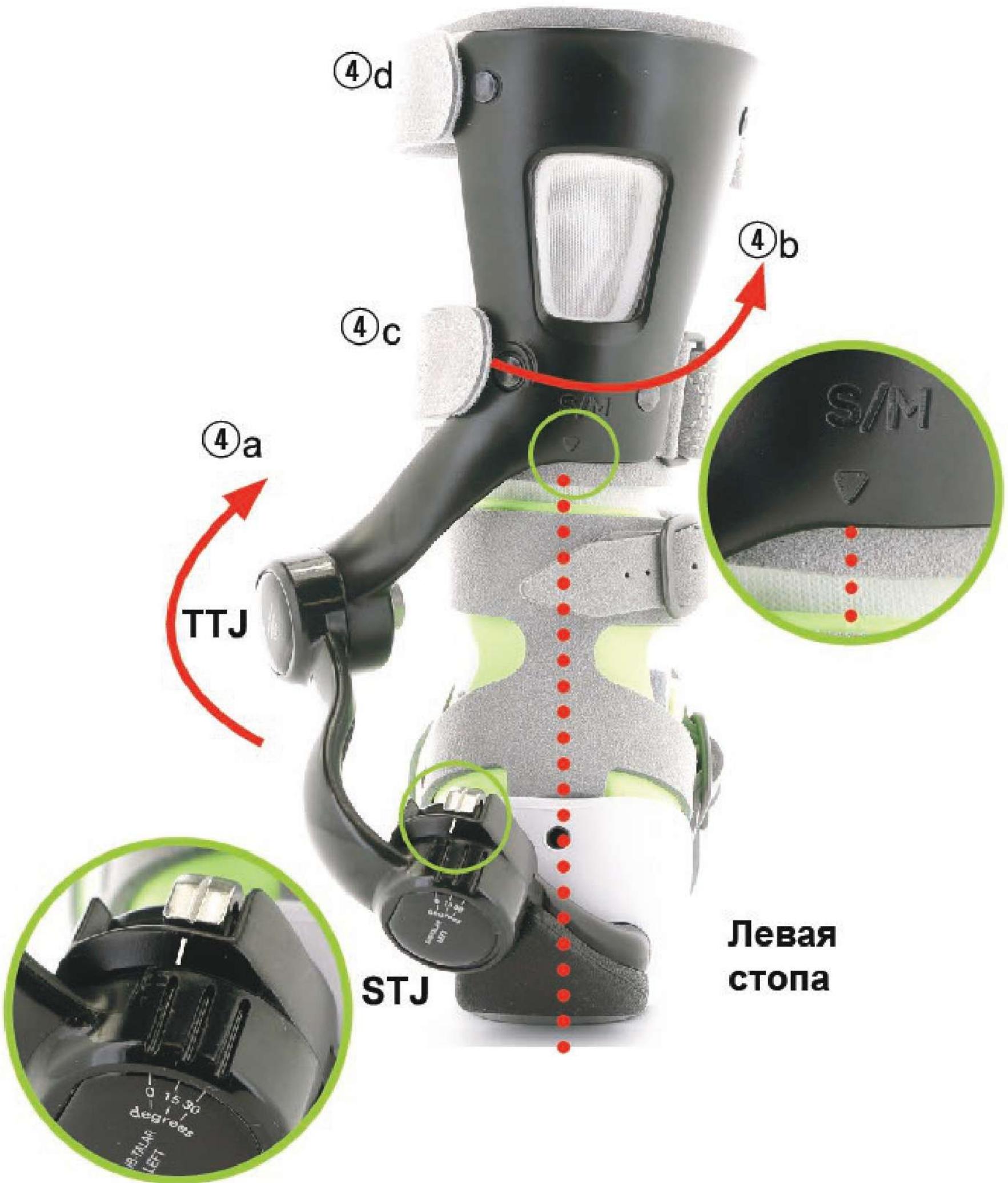

④ Наденьте механизм ADM на голень

④а / ④б Установите ножное крепление ADM на место и зафиксируйте его ремешками. ④с Сначала застегните нижний ремешок. ④д Затем застегните верхний ремешок. При надевании стопа должна находиться в нейтральном положении. Маркер на ножном креплении должен совпадать с серединой голени.

5

⑤а



⑤б



STJ - отведение 0 градусов

TTJ - тыльное сгибание 20-30 градусов



STJ - отведение 5-30 градусов

TTJ - тыльное сгибание 5-30 градусов

⑤ Проверка работы

⑤а Удерживайте стопу с согнутой подошвой. ⑤б Отпустите стопу. Если пациент расслаблен, стопа отводится и сгибается назад. Амплитуда движения зависит от состояния пациента. Дополнительные инструкции см. в п⑦

⑥ Предупреждения и меры предосторожности

Медицинское устройство класса 1. Только для поддержания коррекции косолапости. Если на ортез надет механизм ADM, использовать только в ночное время и во время сна. При ношении устройства не позволяйте пациенту ходить, бегать, прыгать или играть. Механизм ADM можно использовать с приспособленной амбулаторной обувью (см. отдельную инструкцию). Размеры ортеза и механизма ADM и конфигурация пружины должны соответствовать назначению вашего врача. В случае непереносимости или постоянного дискомфорта снимите устройство и обратитесь к вашему врачу. Не пользуйтесь поврежденным устройством. Устройство не стерильно и предназначено только для первоначального конечного пользователя. Устройство можно вернуть в компанию C-Pro Direct для безопасной утилизации или утилизировать / отдать во вторичную переработку вместе с обычными домашними отходами. Температура хранения: от +2 до +22°C. Не следует допускать попадания на устройство от прямого солнечного света, устройство следует хранить в чистом и сухом виде.

⑦ Дополнительная помощь и консультации

Величина абдукции (отведения) и тыльной флексии стопы зависит от состояния пациента, амплитуды движения и состояния релаксации. Часто улучшение положения наступает через 15-30 минут использования и (или) сна. Если есть сомнения, обратитесь к лечащему врачу.